

Occult Blood For stool specimen (IFOBT)

- ชื่อการทดสอบ : Occult Blood For stool specimen (IFOBT)
ตัวย่อ IFOBT
- ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ :
 - ตรวจหาเลือดที่ปนในอุจจาระที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
 - บ่งชี้ความผิดปกติของทางเดินอาหาร ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ (Colorectal cancer)
- การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :
 - ไม่ควรเก็บในระหว่างมีรอบเดือน
 - ไม่ควรเก็บหากมีเลือดออกเนื่องจากโรคริดสีดวงทวารหนักไม่ควรเก็บในระหว่างมีรอบเดือน
- สิ่งส่งตรวจ (specimen)
 - ชนิดของสิ่งส่งตรวจ อุจจาระ 1 - 2 กรัม
 - ภาชนะ(container type) : ภาชนะปากกว้างที่แห้ง สะอาด มีฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม
- การส่งตรวจ และข้อควรระวัง (handling) : ควรส่งทันทีโดยหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
- วัน และเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00-16:30 น.
- ระยะเวลาในการรอผลตรวจวิเคราะห์ (turnaround time) : ประมาณ 45 นาที
- การรายงานผล : Negative/Positive
- ค่าตรวจ (charge) : 150 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
- วิธีการวิเคราะห์ (methodology) : Immunochromatographic assay
- สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference) :
 - อุจจาระส่งตรวจในระหว่างมีรอบเดือน
 - เลือดออกเนื่องจากโรคริดสีดวงทวารหนัก
- ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายในวันที่ส่งตรวจ
- เอกสารอ้างอิง (reference) : ใบแทรกผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ASAN Easy Test FOB